


LEGGI ATTENTAMENTE: istruzioni per il prelievo

Il kit di prelievo del DNA contiene:

- Una busta in plastica BIOHAZARD con all'interno:
- 2 tamponi buccali CE MDD Sterili
- 2 microprovette con la soluzione di conservazione (liquido blu)
- 1 foglio per il consenso informato alle analisi
- 1 adesivo di sicurezza

Prelievo

A) Procedere con il campionamento assicurandosi di non aver fumato, mangiato, bevuto caffè o altre bevande a deccezione di acqua, da almeno 45 minuti. Se necessario, sciacquare la bocca con acqua, senza usare collutori o altri prodotti per l'igiene orale.

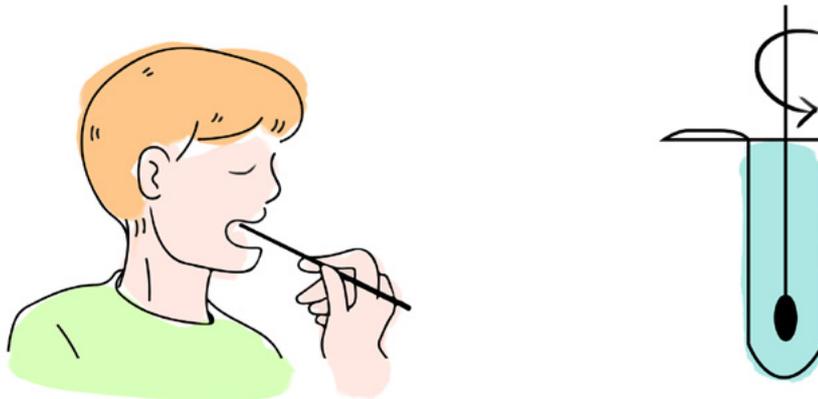

Effettuare i seguenti passaggi:

1. Aprire la parte alta della confezione dei tamponi buccali tirando le due alette ed estrarre il primo tampone.
2. Strofinare il tampone vigorosamente sulla parte interna di una guancia per almeno 30 secondi. Durante questa azione ruotare il tampone mentre vienestrofinato contro la guancia.
3. Risciacquare il tampone nella soluzione di conservazione contenuta nellamicroprovetta (liquido blu), ruotando rapidamente il tampone tra pollice e indice per almeno 15 secondi.

Se il campione è stato fatto bene la soluzione diventerà più opaca.

Se la soluzione resta invece di un blu brillante significa che si è strofinato poco il tampone contro la parete della guancia o che lo si è risciacquato poco nellaprovetta. Non spezzare mai il tampone nella provetta.



- B)** Ripetere l'operazione sull'altra guancia con il secondo tampone, e risciacquarlo nella seconda provetta.
- C)** Controllare che le provette contenenti la soluzione di conservazione siano state chiuse correttamente e inserirle nella busta di plastica a rischio biologico, chiudendola con la zip.
- D)** Compilare e firmare il consenso informato all'analisi ponendo particolare attenzione alle firme e inserirlo, insieme alle provette e alla busta di plastica, nella busta di cartone. La soluzione di conservazione consente il trasporto a temperatura ambiente.
- E)** Sigillare la scatola di cartone posizionando il sigillo di sicurezza sulla chiusura coprendo bene il foro.

Spedizione

- F)** Una volta terminata la procedura descritta al punto E, procedere all'invio dei campioni al laboratorio NGB genetics. È importante consegnare al corriere la busta perfettamente chiusa insieme al documento di trasporto (lettera di vettura) incluso nel kit. È possibile eseguire gratuitamente la spedizione nei seguenti modi:
- prenotando il ritiro via mail scrivendo a info@thesautonapproach.it con oggetto: Ritiro test genetico. Si può specificare la data in cui effettuare il ritiro a partire dalle 24 ore successive;
 - Se hai scelto il corriere SDA per la spedizione è possibile consegnare la busta con i campioni direttamente ad una sede SDA o Kipoint, in tal caso avvisa via mail comunicando il giorno in cui hai deciso di effettuare il prelievo ed il giorno in cui verrà effettuata la spedizione. Non è possibile consegnare la busta in sede se hai scelto il corriere GLS;
 - si può procedere alla spedizione utilizzando anche un altro corriere o mezzo: in questo caso il costo è a proprio carico.
- G)** Il laboratorio completerà le analisi in 10 giorni lavorativi (due settimane) dal momento del ricevimento dei campioni e riceverai quindi via mail l'avviso dal laboratorio per scaricare il referto e il nostro Report con i risultati del test e i consigli di Devi per ciascun risultato.

Per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento, non esitare a ricontattarci a info@thesautonapproach.it